

言葉が伝われば 心も通じます

対話くん

型番: HI-01S



耳元ではっきり聞こえる

周りの音がうるさくないね

マイクで話しますね



高齢難聴者の対応で重要事項をきちんと伝えることができます。

【商品特徴】

特 質	素直で、聞き易い音
	スライドスイッチの簡単操作
サイズ	サイズ 49×49×15mm
重 量	重量 14g
電 源	8時間/1日で約2か月 (単四アルカリ電池1本)
定 価	20,000円(税抜)



診療で



会計・次の予約に



【こんな時に使えます】

- ・病院の説明の時
- ・仲間との会話の時
- ・街を歩く時

※集音器として使えます



対話くんの マイクを
電話の受話器のスピーカー
(スピーカーホーン) に付けます

株式会社東京信友

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル

TEL:03-3358-8000 FAX:03-3358-6330

より詳しく対話くんを知ろう



耳元ではっきり聞こえる

周りの音がうるさくないね




高齢難聴者の対応で重要事項をきちんと伝えることができます。

補聴器、集音器 と「会話器」の違い

一番の違いは集音マイクの位置です

- ・補聴器、集音器:集音マイクは聞き手側（自分）
「会話器」：集音マイクは話し手側にあります。
- ・補聴器は、そのマイクで拾った小さくなった声を聞こえる大きさに増幅します。周りの音も一緒に大きくなりますので、騒音が大きいと聴き取りにくくなります。
- ・「会話器」では、声をそのままの大きさと聞き手の耳に伝えます。周りの音を大きくしませんので、騒音に邪魔されず声ははっきり聞こえます。
- ・下の図の青い線は、話し手の声の大きさが距離によって小さくなることを示しています。その上に描いた葉っぱは、聞こえ方を画で表現しています。

補聴器と「会話器」の違い（音と距離の関係からの説明）

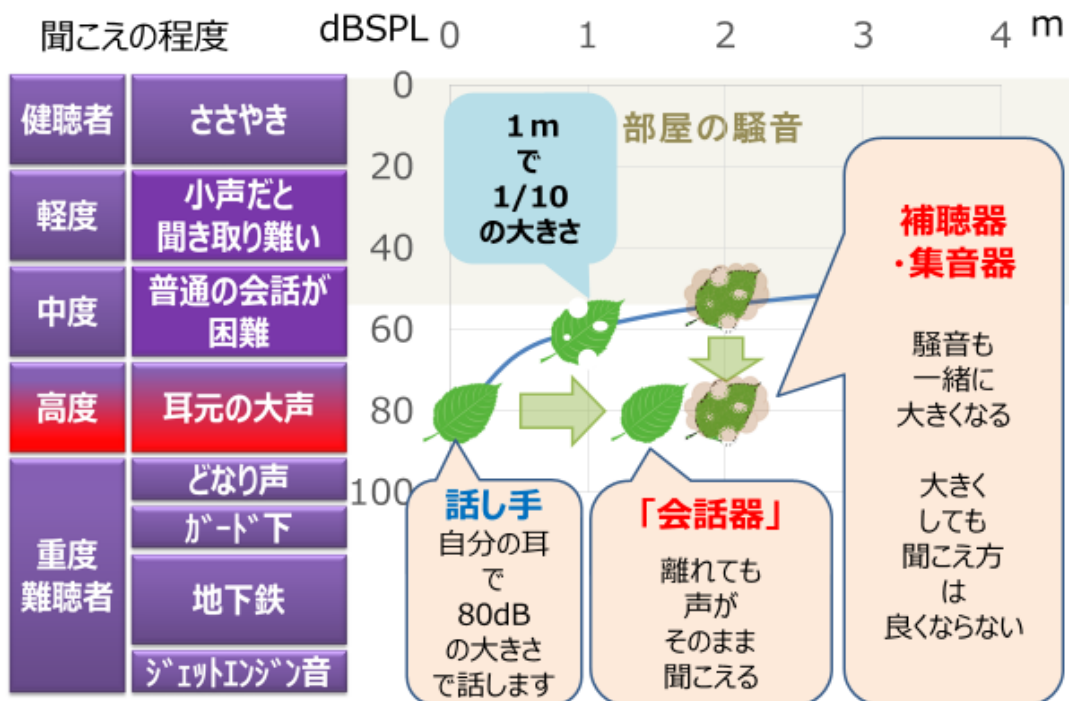

こんな場面で！

受付で



診療で



検査で



会計・次の予約に



お客様の声

TVの音量問題を解決します

個人

電話で 話せるようになりました (インターホンでも)

個人

母の顔が穏やかになりました
(訪問介護の利用者)

横浜市中区 幸子さん (84歳)

・TVの音量が 60→20へ下がり、
近所からの苦情が無くなりました。

・聞こえないと、悪口を言われてる？
などと考えがちだったみたいですが、
今ではとても穏やかな顔をしています。



夫婦喧嘩が減りました

横浜市神奈川区 山本さん

TVの音量が大きい！小さい！
で喧嘩になりました

↓
ご主人が聞こえ易い音量に設定
奥様は 対話くんで聞くと…

↓
TVの音量問題は解決しました



横浜市旭区 伴 猛さん

息子家族広島、自分は横浜市旭区で独居
近くに親戚はもう居なくなって、
広島と電話するのが楽しみです。

対話くんの マイクを
電話の受話器のスピーカー
(スピーカーホーン) に付けます



スタッフが話すことが 良く伝わります

高齢者施設・訪問介護

前橋市 総合高齢者施設
えいめい

普通の大きさの声でも
良く会話ができるようになります
スタッフ、利用者とも助かっています



気に入られて
個人で購入する方もいらっしゃいます

横浜市 訪問介護
マザーライク

耳の不自由なお客様に
紹介させていただきました。

↓
購入いただいた所では
スタッフの話が
良く伝わるようになり
助かっています



言葉が伝われば 心も通じ

